

## Parkinson rollator

Veilig en vertrouwd op pad

### Een juiste loophouding

Deze rollator is uitermate wendbaar en zorgt voor een stabiele en correcte loophouding. De gebruiker loopt niet achter maar in de rollator. Positie en stand van de naar voren gerichte handgrepen zorgen voor een juiste loophouding, nek, rug, armen en polsen worden ontlast.

### Laserlijn

Bij het gaan lopen drukt de gebruiker op een knopje aan de handgreep. De laser projecteert een rode lijn op de grond tussen de achterwielen. De gebruiker wordt hierdoor uitgenodigd om te gaan lopen. Wanneer men over deze laserlijn stapt, is het 'freezing moment' (moeite bij beginnen met lopen van Parkinson patiënten) voorbij. Door de ingestelde timer gaat het laserlicht automatisch uit.



*Dit product wordt geleverd door Joerns Healthcare.*

### Technische gegevens

Max belasting	150 kg
Gewicht	8 kg
Totale breedte	62 cm
Handvathoogte	77 tot 95 cm
Zithoogte	59 cm
Zitbreedte	44 cm
Lengte	69 cm
Vouwmaat (L x B x H)	86 x 63 x 29 cm

Het afgebeelde product is ter illustratie en kan in kleur of model afwijken van het geleverde product.