



Arise® 1000 EX

Handleiding Arise® 1000 EX

Het Arise® 1000 EX systeem is ontwikkeld ter preventie en behandeling van decubitus. bij cliënten met een gewicht tot 445 kilo.

Het systeem is eenvoudig te installeren en onderhoudsvriendelijk. De luchtsystemen zijn voorzien van een gecoat, wasbare incontinentiehoes die druk- en schuifkrachten helpen voorkomen.

Het Arise® 1000 EX systeem is geschikt voor gebruik in ziekenhuizen, zorginstellingen en in thuiszorg situaties. Het biedt de gebruiker optimale drukverlichting. De Arise® 1000 EX systeem is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.

LET OP: ZORG BIJ VERBREDING / VERSMALLING VAN HET ARISE1000 EX SYSTEEM DAT HET (BARI10A) BED EVENEENS VERBREED/VERSMALD WORDT.

Productomschrijving

De Arise® 1000 EX is een matrasvervangend pulserend low air loss systeem. Het is bewezen dat "low air loss therapie" een waardevol hulpmiddel is bij de behandeling van decubitus. De low air loss functie realiseert een luchtstroom onder de hoes. De powerunit heeft een CPR-mogelijkheid voor het snel leeg laten lopen van het matras. De nylon gecoatde luchtkussens zijn van hoge kwaliteit, waardoor schuifkrachten worden opgevangen.

De semipermeabele hoes voorkomt schuifkrachten en complicaties bij incontinentie. De hoes heeft een ademend vermogen en een goede vochtopname en vochtafgifte. De hoes neutraliseert tevens geurtjes en voorkomt schimmelvorming en bacteriegroei.

Maximale belasting:	445 Kg
Afmeting matras, incl. ondermatras:	203-224 x 91/107/122 x 20 cm (lxbxh)
Gewicht matras:	13 kg
Afmeting power unit:	34 x 28 x 19 cm (lxbxh)
Gewicht powe runit:	4,5 kg

Installatie

1. Verwijder het basismatras uit het bedframe.
2. Leg het Arise[®] 1000 EX matras op het bed met de luchtslang aansluiting aan het voeteneind.
3. Hang de powerunit met de daarvoor bestemde haken aan het voeteneind van het bed.
4. Sluit de luchtslang aan de zijaansluiting van de powerunit en controleer de slang op de aanwezigheid van knikken.
5. Steek de stekker in het stopcontact. Druk op de toets 'AAN' om de powerunit in te schakelen.
6. Het matras vult zich direct.
7. Plaats de cliënt nu op het matras. Het is mogelijk zowel voor als na het plaatsen van de cliënt het matras te vullen. Met de + en - knoppen kunt u het gewenste comfort instellen (hard - zacht). Let op: De cliënt dient volledig te worden gedragen door de luchtcellen (dus niet te zacht).
8. Een goede indicator voor de comfort instelling is de "handcontrole". Plaats uw hand verticaal tussen de luchtbanen (onder de stuit), zodat tussen de stuit en de speciale foam bodem van het luchtmatras een ruimte aanwezig is van 2 à 3 vingers hoog.



Instellingen

- **Autofirm**
Gebruik de "Autofirm" modus om het matras snel tot maximale druk op te blazen. Deze instelling kan prettig zijn als ondersteuning tijdens transfers van cliënten of andere verzorgende handelingen. Na 12 minuten hervat het systeem automatisch de Statische/Flotatie instelling.
- **Therapie**
Met deze instelling biedt het Arise[®] 1000 EX matras volledig flotatie voor het lichaam en blijft statisch, waardoor immersie en flotatie mogelijk wordt voor de cliënt.
- **Pulserend**
In de pulserende instelling wordt de druk in alle therapeutische cellen iedere 30 seconden iets verlaagd, wat de cliënt als prettig kan ervaren.

- **Druksensor**
Wordt het hoofdeinde van het matras meer dan 25° omhoog gezet, dan gaat het Led-lampje branden. Het systeem verhoogt de druk in het matras om de grotere druk in het middendeel van het matras te compenseren.
- **Lockout (blokkering)**
Voorkomt niet-toegestane wijzigingen van de instellingen van de powerunit. Vijf minuten na de laatste aanpassing in de modus begint het lampje, dat aangeeft dat het systeem aanstaat, te knipperen. Dit betekent dat de blokkering is geactiveerd. Om de therapiemodus te wijzigen, moet eerst de blokkering worden uitgeschakeld. Dit doet u door tegelijkertijd op de knoppen + en - "Aanpassen comfort" te drukken,. Hierna wordt de blokkering ontgrendeld.
- **Standby**
Wanneer het lampje brandt: druk op de AAN/UIT knop. Stel de voorkeursmodus voor de therapie en het comfortniveau opnieuw in.
- **Knoppen voor aanpassing comfort.**
De knoppen voor "Aanpassen comfort" vindt u op de rechts op het bedieningspaneel. Binnen een therapeutische tijdsafbakening kan het systeem worden aangepast aan de behoeften van de individuele cliënt. Met deze knoppen kunt u de hoeveelheid lucht (hardheid) van het Arise[®] 1000 EX matras bepalen. Gebruik de + en - om de druk te verhogen of verlagen.

Reanimatie

1. De slangaansluiting bij het bedieningspaneel is gemerkt met de letters CPR. Bij reanimatie: ontkoppel de slang (CPR) van de powerunit door middel van het indrukken van de ribbels. Het systeem loopt direct leeg door de druk van de cliënt.
2. Om de therapie te hervatten, sluit u de slang opnieuw aan op het bedieningspaneel.

Reiniging

1. Het Arise 1000 EX systeem dient bij iedere vervuiling te worden gereinigd met water en zeep.
2. Nawassen met water en laten drogen.
3. Desgewenst aanvullend desinfecteren door middel van alcohol 70% of chloor 1000 ppm.
4. Let op de Arise 1000EX nooit zonder hoes gebruiken!
5. Optioneel: Reinig de hoes separaat van de overige was in een wasmachine. De hoes kan op 60° worden gewassen. De gebruikelijke wasmiddelen kunnen worden gebruikt.
6. De hoes kan in een droogtrommel worden gedroogd.

LET OP!! Scherpe voorwerpen kunnen het matras beschadigen en daarmee een lek veroorzaken. Dit kan de behandeling van de cliënt beïnvloeden.

Einde gebruik

1. Het gebruik dient te worden afgemeld bij de leverancier.
Bel hiervoor met: Joerns Healthcare B.V. **(030) 63 63 700**
2. Is het mogelijk het matras op te ruimen, handel dan als volgt:
 - a. Neem de gebruikelijke hygiëne richtlijnen in acht bij het afnemen van het bed (o.a. gebruik van niet-steriele handschoenen).
 - b. Deponeer eventueel meegeleverde losse hoezen in een plastic (vuilinis)zak.
 - c. Ontkoppel de slangen van de powerunit om het matras leeg te laten lopen.
 - d. De Arise[®] 1000 EX kan leeg simpel worden opgerold. Niet vouwen!!
3. Is het niet mogelijk om het matras op te ruimen dan zal de servicedienst medewerker van Joerns Healthcare hiervoor zorgdragen.

Problemen oplossen

Geen of lage druk in het matras

- Controleer of het netsnoer goed in het stopcontact ingeplugd is.
- Controleer of de slangen goed bevestigd zijn en of er geen knikken in zitten.
- Maak de slangen los van de powerunit en kijk of er lucht uit de powerunit komt.
- Controleer het standbylampje. Als dit niet brandt, druk dan op de AAN/UIT knop.
- Blijft het probleem bestaan, dan zal de servicedienst van de leverancier de powerunit inspecteren.

De therapie-instellingen/comfortniveau kan niet worden gewijzigd

- Controleer of de Lockout-functie is uitgeschakeld. Om deze functie uit te schakelen, drukt u tegelijkertijd op de + en - van "Aanpassen comfort".
- Blijft het probleem bestaan, dan zal de servicedienst van de leverancier de powerunit inspecteren.

De powerunit maakt teveel geluid

- De powerunit "resoneert" op het schuteind van het bed. Een demping tussen powerunit en beddeind kan uitkomst bieden. Het aanzuigrooster moet echter vrij blijven.
- Blijft het probleem bestaan, dan zal de servicedienst van de leverancier de powerunit inspecteren.

Arise[®] 1000 EX

- | | |
|---|--|
| De powerunit krijgt geen power | <ul style="list-style-type: none">• De slang is niet goed vastgeklikt aan de powerunit, waardoor luchtlekkage ontstaat. Sluit de slang goed aan. |
| Alarm reset | <ul style="list-style-type: none">• Controleer of het netsnoer goed ingeplugd is in de powerunit en in het stopcontact.• Blijft het probleem bestaan, dan zal de servicedienst van de leverancier de powerunit inspecteren. |
| Stroomstoring | <ul style="list-style-type: none">• Wanneer de stroomtoevoer wegvalt, klinkt er een alarmsignaal en begint het alarmlampje te knipperen., Druk op de knop "Alarm reset" om het alarm uit te schakelen. |
| De cliënt geeft aan dat matras te zacht is en/of zakt er te diep in weg | <ul style="list-style-type: none">• Bij een stroomstoring biedt de therapeutische ondersteuningscel 12 uur ondersteuning aan de cliënt. Ontkoppel de slangen niet!• Na de stroomstoring start het bedieningspaneel op in de standby modus. Druk de AAN/UIT knop in en stel de voorkeursinstellingen opnieuw in.• Door de automatische drukverdeling 'geeft het matras toe aan druk' hetgeen juist belangrijk is voor de behandeling.• De verpleegkundige van de cliënt kan eventueel contact opnemen met de verpleegkundig consulent van Joerns Healthcare. |

Bij vragen of in geval van storing: neem zo spoedig mogelijk contact op met Joerns Healthcare B.V. (030) 63 63 700 24 uur per dag / 7 dagen per week

Voor de afnemer / gebruiker van onze power units, behorende bij AD systemen geldt:

Modificaties* door afnemer / gebruiker en het gebruik van niet-originele onderdelen** zijn niet toegestaan. In beide gevallen vervalt per direct zowel de (fabrieke)sgarantie als de aansprakelijkheid van Joerns als leverancier.


*Modificaties mogen uitsluitend door Joerns service- en onderhoudsmedewerkers of door Joerns gecertificeerde technici worden uitgevoerd.

Het gebruik van niet-originele **accu's is toegestaan mits deze dezelfde specificaties hebben als de originele accu.

LET OP! Eerst bed verbreden / verlengen en daarna matras verbreden / verlengen.

Gebruik hiervoor de knoppen aan het voeteneind van het Arise 1000EX matras.

Eerst matras laten leeglopen, daarna bed weer versmallen.

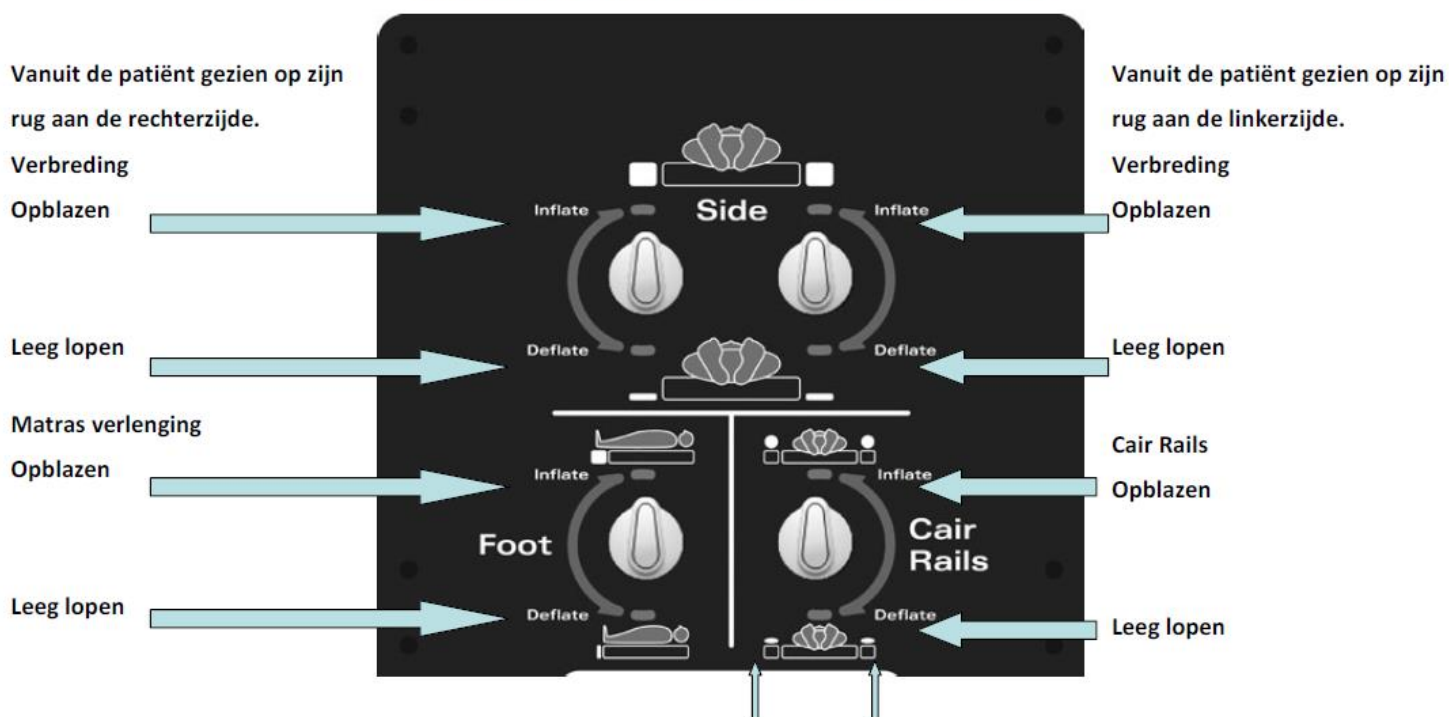

PEOPLE • PASSION • PERFORMANCE

WWW.JOERNS.NL